


Co byste měli vědět o používání práškového inhalátoru NEXThaler®

Hlavní části inhalátoru NEXThaler®

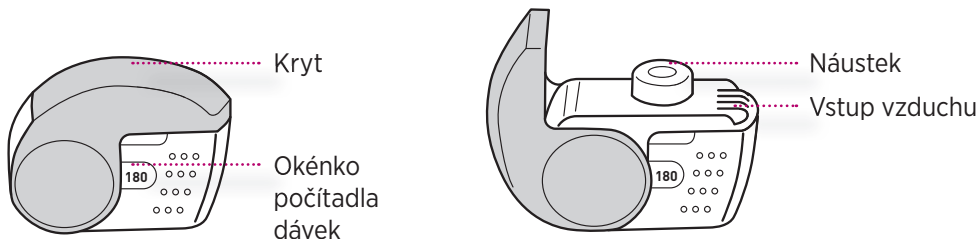

Systém trojitě kontroly inhalace dávky vám
pomůže ověřit **SPRÁVNOU INHALACI** třemi smysly

SLUCH




Kliknutí uslyšíte jenom
v případě dostatečně
silné inhalace
a uvolnění dávky.

CHUŤ



Nasládlá chuť
v ústech (nebo pocit
prášku v ústech) jenom
po úspěšné inhalaci.

ZRAK

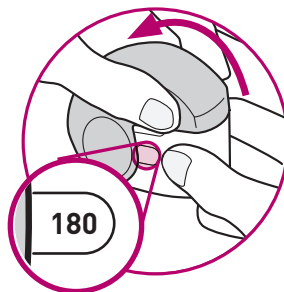

Počítadlo se posune
a odečte jenom
po úspěšné inhalaci.

Důležité informace:

Počítadlo dávky se posune po správné inhalaci a zavření krytu.

Bez správné inhalace se počítadlo dávky po zavření krytu neposune.



Při inhalaci vždy sedíte anebo vzpřímeně stojíte.

Při inhalaci nikdy nezakrývejte vstup vzduchu.

Návod na inhalaci práškového inhalátoru NEXThaler®



1. Otevřete

- Úplně otevřete kryt.
- Hluboce vydechněte mimo inhalátor.

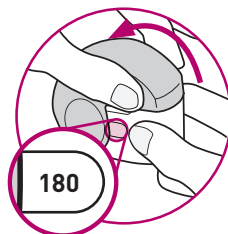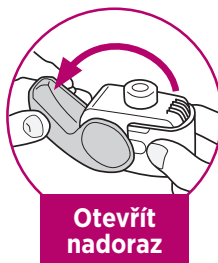

2. Inhalujte

- Přiložte inhalátor k ústům a sevřete rty okolo náustku.
- Hluboce a silně se nadechněte a sejměte inhalátor z úst. Zadržte dech na 5-10 sekund nebo co nejdéle to bude možné.
- Pomalu vydechněte.

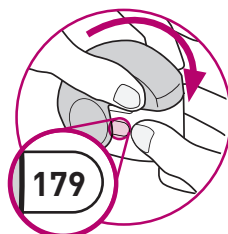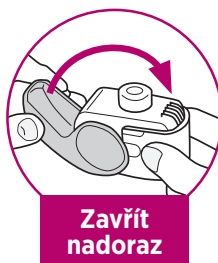

3. Zavřete

- Dejte inhalátor zpět do svislé polohy a úplně zavřete kryt.
- Zkontrolujte, zda počítadlo dávek ukazuje číslo o jedno nižší než před inhalací.

Pro další dávku opakujte kroky 1–3.

Čištění inhalátoru

Za normálních okolností není třeba inhalátor čistit.

V případě potřeby můžete inhalátor vyčistit suchým hadříkem nebo papírovým kapesníkem.

Zabraňte kontaktu inhalátoru s vodou.